

## Aquest document conté informació d'utilitat sobre la Columna de Rescat Cardíac (CRC) instal·lada al vostre municipi.

### FUNCIONAMENT DE LA CRC

La Columna de Rescat Cardíac (CRC) està formada per 3 elements:

- El desfibril·lador (DEA)
- La cabina de control
- La columna informativa



*Exemple de CRC*



*Detall de la cabina*


Totes les cabines estan connectades a un **centre de control web 365 dies, 24 hores al dia**. La cabina realitza periòdicament controls automàtics de funcionament.

En cas de detectar-se alguna incidència relacionada amb el funcionament de la CRC, uns **leds vermells** s'il·luminen de forma intermitent. El Servei d'Assistència Tècnica (SAT) detecta automàticament tots els esdeveniments i farà les operacions de manteniment oportunes en cas de ser necessàries.

Quan una cabina s'obre, sona una alarma. **L'ALARMA fa diverses repeticions i s'aturarà automàticament després d'uns minuts** quedant encesos els leds vermells indicats anteriorment. Aquest fet no és indicatiu de cap malfuncionament sempre que la tapa de la cabina hagi quedat ben tancada.

## GESTIÓ DE FALSES ALARMES

Quan s'obre la cabina el sistema envia un correu electrònic informatiu. Sovint es produeixen obertures que no es corresponen a un ús real del desfibril·lador. Es tracta de **falses alarmes**. En aquests casos us demanem que **verifiquem que el desfibril·lador es troba a dins de la cabina així com que la porta de la cabina està ben tancada**. En cas que la cabina no estigui ben tancada cal que la tanqueu segons s'especifica a continuació:

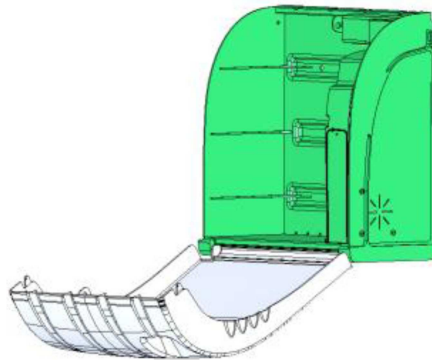

*Desplaçar la tapa primer cap endavant i després cap amunt per tancar-la.  
Pressionar els dos laterals superiors i comprovar que encaixen bé.*

Si teniu activat la comunicació per correu electrònic de les obertures, tingueu en compte que per causes tècniques poden diferir l'hora d'enviament del correu electrònic i l'hora en que es produeix l'obertura. Vegeu en aquest sentit la data i l'hora de l'esdeveniment que s'indica en el cos del missatge:

### Exemple correu electrònic d'obertura

[Alarma 1243P935: Apertura de emergencia](#)  
**Fecha/Hora: 26-06-2013 20:42:15**

[C/ Salvetat, 3-Local Polivalent, DEA 385](#)  
17133-Parlavà

### Exemple correu electrònic d'extracció

[Alarma 1240P706: DAE Extraido](#)  
**Fecha/Hora: 26-06-2013 08:08:12**

[Avda. Pla de Fenals-Puntet Fenals, DEA 340](#)  
17130-Lloret de Mar

Recordeu que en produir-se una obertura sonarà una alarma que s'aturarà automàticament després d'uns minuts.

Si el desfibril·lador **s'ha extret de la cabina i no s'ha arribat a utilitzar caldrà que el custodieu i informeu per correu electrònic a [incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat](mailto:incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat)** i al SAT a través del **902 221 229**

## ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR

**Quan s'extreu el desfibril·lador**, la cabina realitza la trucada al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i envia un correu electrònic. El SEM activa el servei mèdic necessari per atendre una persona amb aturada cardiorespiratòria. En aquesta activació **TAMBÉ ÉS MOBILITZA TELEFÒNICAMENT la Policia Local o els Mossos d'Esquadra.**

Un cop **finalitzada la utilització del desfibril·lador**, si aquest no se l'ha endut el SEM, **caldrà que el custodieu.**

Aviseu al SAT de la utilització mitjançant el **902 221 229** i envieu un correu electrònic a **incidencia@gironaterritorcardioprotegit.cat** indicant els **detalls de la utilització**: la data i l'hora d'utilització, el número de DEA, edat i sexe del pacient així com el telèfon i el nom d'una persona de contacte.

El servei de manteniment realitzarà el buidatge de dades del desfibril·lador, la reposició dels elèctrodes i posarà de nou en servei l'aparell a la seva columna.

## DANYS EN LA COLUMNA DE RESCAT CARDÍAC

En cas de robatori, destrucció o danys (grafits, ratllades, cops, trencaments...) en qualsevol dels element de la CRC caldrà que s'aixequi la corresponent acta de comprovació de danys mitjançant la Policia Local o els Mossos d'Esquadra.

Comuniqueu la incidència al SAT mitjançant el **902 221 229** i envieu un correu electrònic a **incidencia@gironaterritorcardioprotegit.cat** indicant els detalls de l'incident.

Des de Dipsalut podem enviar-vos les fotografies que la cabina ha captat en el moment de l'extracció del desfibril·lador. Ens podeu demanar aquestes fotografies enviant una petició al mail **informacio@gironaterritorcardioprotegit.cat**. De conformitat amb la llei de protecció de dades, caldrà que aquesta petició es faci en nom de l'alcalde/essa.

## IMPORTANT

**Correu electrònic per comunicar les incidències:**

[incidencia@gironaterritorcardioprotegit.cat](mailto:incidencia@gironaterritorcardioprotegit.cat)

**Telèfon per comunicar les incidències:**

**902 221 229**